

Incidin® Rapid Desinfektionsmittel

Flüssiges Desinfektionsmittel-Konzentrat für die Desinfektion von Atemschutzmasken, Atemschutzausrüstung, Tauchgeräte, Chemikalienschutzanzügen, Trockenschränken sowie Arbeitsflächen und Fußböden.



Die Desinfektion und Reinigung durch eine ausgewählte und aldehydhaltige Wirkstoffkomposition, die ein breites Wirkspektrum bei besonders niedriger Einsatzkonzentration in einem Tauchbad hat.

Registrierung

- Medizinprodukt von ECOLAB, Klasse IIa gem. 93/42/EWG CE 0297
- Meldung als Biozidprodukt
Deutschland: Meldenr.: N-25261
Schweiz: Meldenr.: CHZN 1808

Vorteile

- Formaldehydfreies Desinfektionsmittel-Konzentrat
- Hohe Desinfektionssicherheit trotz niedrigerer Einsatzkonzentration und verkürzter Einwirkzeit im Tauchbad

- Breites Wirkspektrum gegen Bakterien, Hefen und Viren
- Umfassende Materialverträglichkeit
- Einfache Handhabung der Dosierung durch zusätzliches Dosiergerät DG1
- Hohe Wirtschaftlichkeit durch niedrigere Einsatzkonzentration im Tauchbad
- VAH-gelistet und viruzid

ANWENDUNGSHINWEISE

- Biozide vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformation lesen.
- Die jeweilige Dräger Gebrauchsanweisung für Atemschutzmasken, Atemschutzausrüstung, Chemikalienschutzanzüge usw. sowie Anwendungshinweise des Desinfektionsmittelherstellers unbedingt beachten!

DOSIERUNG

	Wirksamkeit (%)	Konzentration (ml/L)	Einwirkzeit (Min.)
Desinfektion von Atemschutzgeräten und Atemschutzausrüstung im Tauchbad nach EN 14561/EN 14562 (baktericid/levurozid)	1,5	15	15



Incidin® Rapid
2 Liter Flasche



Incidin® Rapid
6 Liter Kanister



Incidin® Rapid
30 Liter Kanister

ZUBEHÖR

Dosiergerät DG1	Mikroprozessorgesteuertes Dosiergerät zur exakten Herstellung von wässrigen Desinfektionslösungen.	65 70 187
-----------------	--	-----------

DOSIERTABELLE – FLÜSSIG

Liter	Konzentration der Anwendung 1,5 %
1 Liter	15 ml
2 Liter	30 ml
3 Liter	45 ml
4 Liter	60 ml
5 Liter	75 ml
8 Liter	120 ml
10 Liter	150 ml
20 Liter	300 ml
30 Liter	450 ml

Anwendungshinweise:

Beispiel: 10 Liter = 1,5 %ige Anwendungslösung = 150 ml Desinfektionsmittel + 9,85 Liter Wasser vorlegen. Dem Wasservolumen entsprechende Menge Desinfektionsmittelkonzentrat zudosieren, kurz umrühren. Lösung ist sofort einsatzbereit. Gem. RKI*-Empfehlung Desinfektionsmittellösungen arbeitstäglich wechseln. Standzeit einer unbelasteten Desinfektionsmittellösung bis zu 14 Tage. Die Lösung in sauberen, abgedeckten Gefäßen (Spülbecken oder Vorratsgebinde) lagern.

* Robert Koch Institut, Berlin

BESTELLINFORMATION

Incidin® Rapid	3 × 2 L Griffflasche mit Dosiersystem	R 61 881
Incidin® Rapid	6 Liter Kanister	R 61 882
Incidin® Rapid	30 Liter Kanister	R 61 883
Dosiergerät DG1		65 70 187

Für die Anwendung zur Reinigung von Medizinprodukten kann eine separate Produktinformation von ECOLAB angefordert werden.

Hersteller: INCIDIN® ist eine eingetragene Marke von ECOLAB

VERTRIEB

Dräger Safety AG & Co. KGaA
Revalstraße 1
23560 Lübeck, Deutschland

www.draeger.com

REGION OST

Dräger Safety AG & Co. KGaA
An der Harth 10 B
04416 Markkleeberg
Tel 0341 35 0 31-0
Fax 0341 35 0 31-161
vertrieb.ost@draeger.com

REGION SÜD

Dräger Safety AG & Co. KGaA
Vor dem Lauch 9
70567 Stuttgart
Tel 0711 721 99-0
Fax 0711 721 99-50
vertrieb.sued@draeger.com

NIEDERLASSUNGEN

REGION NORD

Dräger Safety AG & Co. KGaA
Albert-Schweitzer-Ring 22
22045 Hamburg
Tel 040 668 67-0
Fax 040 668 67-150
vertrieb.nord@draeger.com

REGION WEST

Dräger Safety AG & Co. KGaA
Kimplerstraße 284
47807 Krefeld
Tel 02151 37 35-0
Fax 02151 37 35-50
vertrieb.west@draeger.com

DRÄGER SERVICE

REGION NORD

Dräger Safety AG & Co. KGaA
Albert-Schweitzer-Ring 22
22045 Hamburg
Tel 040 668 67-161
Fax 040 668 67-155
service.nord@draeger.com

REGION OST

Dräger Safety AG & Co. KGaA
An der Harth 10 B
04416 Markkleeberg
Tel 0341 35 0 31-164
Fax 0341 35 0 31-166
service.ost@draeger.com

NOTRUF-NUMMERN:

Deutschland: 0551 19240
Österreich: 01 406 43 43
Schweiz: 145

REGION SÜD

Dräger Safety AG & Co. KGaA
Vor dem Lauch 9
70567 Stuttgart
Tel 0711 721 99-43
Fax 0711 721 99-51
service.sued@draeger.com

REGION WEST

Dräger Safety AG & Co. KGaA
Kimplerstraße 284
47807 Krefeld
Tel 02151 37 35-16
Fax 02151 37 35-29
service.westkr@draeger.com

REGION WEST

Dräger Safety AG & Co. KGaA
Max-Planck-Ring 25 A
65205 Wiesbaden
Tel 06122 95 65-70
Fax 06122 95 65-77
service.westwi@draeger.com

TOCHTERGESELLSCHAFTEN

ÖSTERREICH

Dräger Safety Austria GmbH
Wallackgasse 8
1230 Wien
Tel +43 1 609 36 02
Fax +43 1 699 62 42
office.safety@draeger.com

SCHWEIZ

Dräger Safety Schweiz AG
Aegertweg 7
8305 Dietlikon
Tel +41 44 805 82-82
Fax +41 44 805 82-80
info.ch.sd@draeger.com



Dosiergerät

D-85285-2013